

PROTECTOR NOW+

GEL Pre-lavado y Protector de Instrumental Quirúrgico



¿Qué es PROTECTOR NOW?

Es un Gel pre-lavado clínico y protector de instrumental quirúrgico en spray, que previene el resecamiento de sangre, grasas, tejido y fluidos corporales hasta por 72 horas antes de iniciar su proceso de lavado. Rehidrata y afloja las manchas dentro de los 5 minutos posteriores a su aplicación. Es transparente y de pH neutro. Se enjuaga sin dejar manchas ni residuos y contiene inhibidores de óxido; que reducen la probabilidad de oxidación, deslustre o corrosión del instrumental.



Modo de Empleo

Primero agite bien antes de usar. Asegurarse de romper el seguro rojo de seguridad. Luego apriete el gatillo y distribuya el gel en forma homogénea sobre la bandeja quirúrgica de instrumental, cubriendo generosamente toda la superficie que se desea tratar, déjelo actuar por lo menos por 5 minutos. Finalmente transporte el instrumental para iniciar el proceso de lavado. Utilizar el envase siempre en posición vertical.

Especificaciones Técnicas

Presentación
Apariencia
Concentración
Solubilidad
pH
Peligro de Fuego
Densidad a 20°C
Estabilidad

Gel en Spray
Incoloro
Listo para usar
Total en agua
7 - 8
Propelente inflamable
1.08 - 1.20g/ml
3 año mínimo en condiciones normales



Almacenamiento

Mantener el lugar fresco. Almacenar el producto en su envase original, en posición vertical y cerrado; a temperatura ambiente, entre 4°C y 50°C.



Precaución

Antes de utilizar el producto leer cuidadosamente las instrucciones indicadas en la etiqueta. Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas no responsables. No mezclar con otros productos de limpieza. Mantener en un lugar fresco. Almacenar el producto en su envase original, en posición vertical a temperatura ambiente máximo 50°C. Para la manipulación segura usar siempre equipo de protección personal. No comer, beber ni fumar en las áreas en las que este material es manipulado. No elimine el contenido de este envase a fuentes de agua. No perforar el envase. No aplicar cerca del fuego, producto con gas inflamable. Para Lote: ver envase. Fecha de elaboración: ver envase. Fecha de vencimiento: 36 meses a partir de la fecha de elaboración en adecuadas condiciones de almacenamiento.



Primeros Auxilios

Si se ingiere: Llame al centro de toxicología o a un médico inmediatamente para obtener consejos de tratamiento. No induzca el vómito, no administre nada por la boca a una persona inconsciente. Acuda a un Centro Asistencial.


En contacto con la piel: Remueva la ropa contaminada, lave la piel inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos. Llame a un centro de Toxicología o a un médico inmediatamente para obtener consejos de tratamiento. Acuda a un Centro Asistencial.

En contacto con los ojos: Si corresponde quite los lentes de contacto. Lave los ojos con abundante agua, por arrastre, durante al menos 15 minutos. Llame al centro de toxicología o a un médico inmediatamente para obtener consejos de tratamiento. Acuda a un Centro Asistencial.

**Para emergencia Toxicológica llamar al CITUC:
+56 22 6353 800. ATENCIÓN las 24 horas y todos los días del año.**



Rombo de Seguridad NFPA

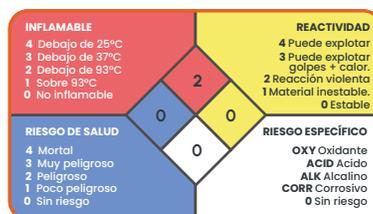

NU 1950